

# EASYPPOINT®

ausziehbare Nadel

- AUTOMATISCHE RETRAKTION DER NADEL
- EINFACH ZU HANDHABEN - GERINGER SCHULUNGSBEDARF
- KANN VOR ODER NACH DER ENTFERNUNG AUS DEM PATIENTEN AKTIVIERT WERDEN
- EINE AKTIVIERUNG VOR DER ENTFERNUNG VERRINGERT DAS RISIKO DES KONTAKTES MIT DER KONTAMINIERTEN SCHARFKANTIGEN NADEL
- EINE AKTIVIERUNG KANN AUF VIELFÄLTIGE ART UND WEISE ERFOLGEN
- VERRINGERT EFFEKTIV DAS RISIKO VON NADELSTICHVERLETZUNGEN
- VERMEIDET WIEDERVERWENDUNG NACH GEBRAUCH
- BLEIBT SICHER BIS ZUR ENTSORGUNG

kompatibel sowohl mit Luer-Lock- als auch Luer-Slip-Spritzen (3 mL oder kleiner)



kann mit Fertigspritzen verwendet werden



## EASYPPOINT®

AUSZIEHBARE NADELN  
(50 pro Karton/400 pro Behälter)

Katalog-Nr.    Nadelgröße

82091	25G x 16 mm
82011	25G x 25 mm
82031	23G x 25 mm

### WEITERE ERHÄLTLICHE SICHERHEITSPRODUKTE

VanishPoint® Injektionsspritze

VanishPoint® Blutentnahmeröhrchenhalter

VanishPoint® Blutabnahmeset

VanishPoint® IV-Katheter

Patient Safe® Injektionsspritze



511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068-5295

P +1-972-294-1770 TF +1-888-703-1010 F +1-972-294-4400  
rtiservice@vanishpoint.com

©2017 Copyright Retractable Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

M127 REV.0 GR, OCT 2017

# NEU EASYPPOINT®

ausziehbare Nadel



## EINFACHE HANDHABUNG

- minimale Änderung der Injektionstechnik
- ermöglicht die einhändige Aktivierung
- **Die Hände und Finger des behandelnden Arztes bleiben zu jeder Zeit hinter der exponierten scharfkantigen Nadel**



EasyPoint-Nadel an jeder beliebigen Luer-Lock- oder Luer-Slip-Spritze anbringen.\* Arzneimittel entsprechend den Richtlinien des Instituts verabreichen.




Drücken Sie die farblich gekennzeichnete Lasche, wodurch die Nadel automatisch in die Sicherheitskammer zurückgezogen wird. **Dieses Gerät ist vorgesehen zur Aktivierung vor oder nachdem die Nadel aus dem Patienten entfernt wird.**



In einem geeigneten Behälter für scharfkantige Abfälle entsprechend den Richtlinien des Instituts entsorgen.

\*3-mL-Spritze oder kleiner

Dreifach abgeschrägte, geschmierte Nadeln sind angenehmer für den Patienten

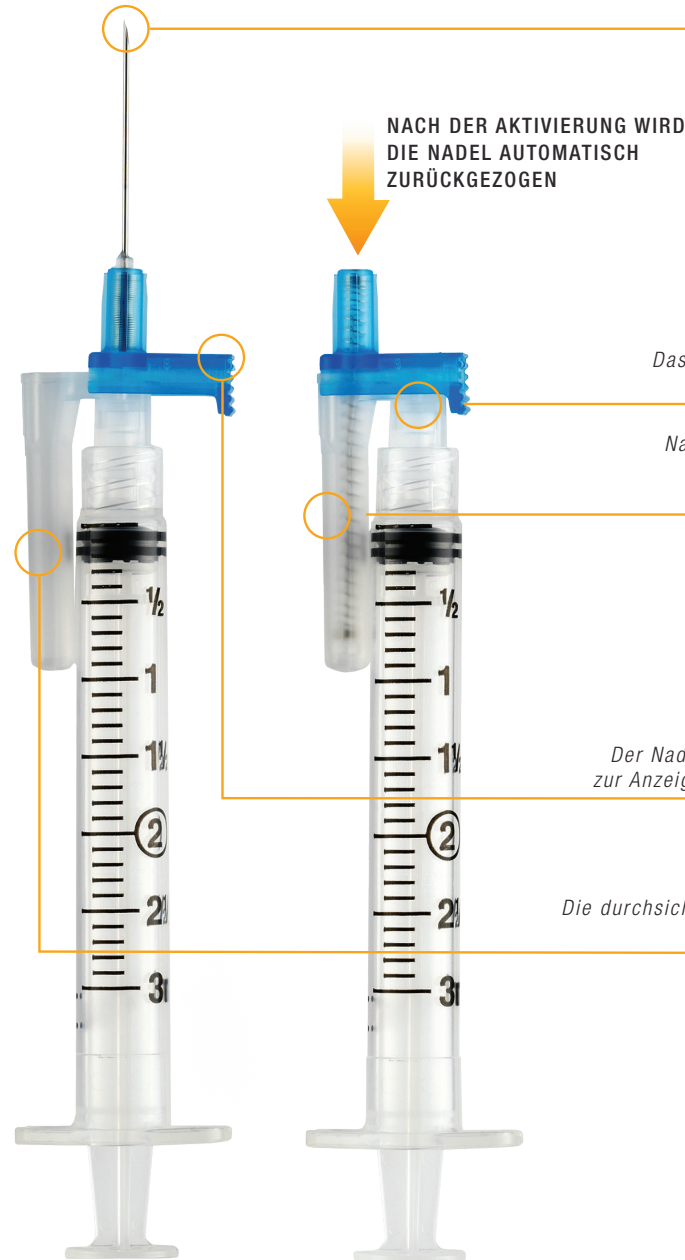

NACH DER AKTIVIERUNG WIRD DIE NADEL AUTOMATISCH ZURÜCKGEZOGEN

Das Standard-Luer-Anschlussstück sorgt für einen sicheren, dichten Anschluss

Nach der Retraction wird die kontaminierte Nadel von einer Sicherheitskammer umschlossen, um Kontakt zu vermeiden

Der Nadelansatz und die Aktivierungslasche sind zur Anzeige des Kanüledurchmessers farbkodiert.

Die durchsichtige, kompakte Sicherheitskammer wirkt sich bei der Injektion nicht störend aus

AUTOMATISCHE RETRAKTION  
- jetzt mit -  
ZUSÄTZLICHER EINSATZFLEXIBILITÄT

EASYPOINT®