

Une prévention des piqûres d'aiguille qui répond à vos besoins



- ▶ élimine littéralement l'exposition
- ▶ activation passive, d'une seule main
- ▶ les mains demeurent en retrait par rapport à l'aiguille
- ▶ mécanisme de sécurité intégré
- ▶ protection lors du rebouchage et du retrait de l'aiguille
- ▶ reste sûr lors de la mise au rebut
- ▶ facile à utiliser, nécessite une formation minimale
- ▶ sûr et efficace pour les patients

Numéro catalogue Description

Seringues à insuline VanishPoint® U-100

100 par boîte/800 par coffret

15291	VanishPoint Seringue à insuline 0,5 mL	30G x 5 mm NOUVEAU
15271	VanishPoint Seringue à insuline 0,5 mL	30G x 8 mm
15221	VanishPoint Seringue à insuline 0,5 mL	30G x 12,7 mm
10291	VanishPoint Seringue à insuline 1 mL	30G x 5 mm NOUVEAU
10271	VanishPoint Seringue à insuline 1 mL	30G x 8 mm
10281	VanishPoint Seringue à insuline 1 mL	29G x 8 mm
10211	VanishPoint Seringue à insuline 1 mL	29G x 12,7 mm

Seringues VanishPoint® 1 mL

100 par boîte/800 par coffret

10131	VanishPoint Seringue à tuberculine 1 mL	27G x 12,7 mm
10151	VanishPoint Seringue à tuberculine 1 mL	25G x 16 mm
10161	Seringue VanishPoint 1 mL	25G x 25 mm

Plateau à seringues pour allergies VanishPoint®

25 par plateau/1 000 par coffret

10134	Seringues pour allergies VanishPoint 1 mL	27G x 12,7 mm
-------	---	---------------

Seringues VanishPoint® 3 mL

100 par boîte/600 par coffret

13021	Seringue VanishPoint 3 mL	27G x 38 mm
10301	Seringue VanishPoint 3 mL	25G x 16 mm
10391	Seringue VanishPoint 3 mL	25G x 25 mm
13011	Seringue VanishPoint 3 mL	25G x 38 mm
10311	Seringue VanishPoint 3 mL	23G x 25 mm
10321	Seringue VanishPoint 3 mL	23G x 38 mm
10331	Seringue VanishPoint 3 mL	22G x 25 mm
10341	Seringue VanishPoint 3 mL	22G x 38 mm
10351	Seringue VanishPoint 3 mL	21G x 25 mm
10361	Seringue VanishPoint 3 mL	21G x 38 mm
10371	Seringue VanishPoint 3 mL	20G x 25 mm
10381	Seringue VanishPoint 3 mL	20G x 38 mm

Seringues VanishPoint® 5 mL 100 par boîte/600 par coffret

Seringues VanishPoint® 10 mL 100 par boîte/600 par coffret

Les seringues VanishPoint® 5 mL et 10 mL sont disponibles avec des longueurs d'aiguille et des jauges variées. Pour la liste complète, veuillez contacter RTI ou visiter notre site web à l'adresse suivante: www.retractable.com



© 2008, 2016 Retractable Technologies, Inc.
All rights reserved. M022 REV.2 FR, SEP 2016

511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-5295 USA
Tel.: (972) 294-1770
Fax: (972) 294-4400
Toll Free: 1-888-703-1010
rtisales@vanishpoint.com

SÉCURITÉ SANS COMPROMIS POUR LES CLINICIENS ET LES PATIENTS



VANISHpoint
SERINGUES

La nouvelle norme de sécurité

VANISHPOINT® Conception sûre

Une étude comparant l'efficacité des dispositifs à sécurité *passive* et des dispositifs à sécurité *active* a montré que les dispositifs à sécurité passive (tels que la seringue VanishPoint®) réduisent de façon significative le risque de blessure par piqûre d'aiguille.¹

Aiguille fixée :

- maintient un système clos
- prévient les fuites et la contamination
- réduit l'espace mort
- prévient les changements superflus d'aiguille

"Il n'est pas nécessaire de changer d'aiguille entre l'aspiration du vaccin depuis le flacon et son injection dans le patient."²

Sûr pour vos patients et vous-même



¹A. J. Goris, et al., "Reducing Needlestick Injuries from Active Safety Devices: A Passive Safety-Engineered Device Trial," *AOHP Journal*, vol. 34, no. 2 (Spring 2014), pp. 14-18.

²CDC (2002). General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) and the American Academy of Family Physicians (AAFP). *MMWR* 51(RR02):1-36.

1

Appliquer une procédure standard pour aspirer le médicament.



2

Préparer et injecter la solution selon une technique aseptique, conformément à la politique de l'établissement.



3

Tandis que l'aiguille est encore insérée dans le patient, appuyer à fond sur le piston pour activer le retrait.



4

Jeter la seringue VanishPoint® dans un conteneur pour objets coupants.



Le VANISHPOINT® ADVANTAGE

Sécurité optimale grâce à la technologie de rétraction automatisée

Les repères clairs et sans obstructions permettent une posologie exacte

L'aiguille lubrifiée à triple biseau assure le confort du patient



**ACTIVATION FACILE
D'UNE SEULE MAIN**

**SANS EXPOSITION
À L'AIGUILLE CONTAMINÉE**

L'activation avant retrait prévient l'exposition à l'aiguille contaminée

L'aiguille se rétracte directement du patient vers l'intérieur de la seringue.



Les seringues à insuline VanishPoint® SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES AVEC des aiguilles de 5 mm et des aiguilles de 8 mm




Les seringues activées VanishPoint® nécessitent moins d'espace à la mise au rebut que d'autres seringues de sécurité et préviennent donc les blessures associées à la mise au rebut.


Autres produits de sécurité disponibles



Kit de prélèvement sanguin VanishPoint®

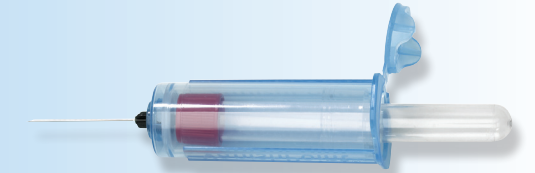

Porte-tubes de recueil de sang VanishPoint®

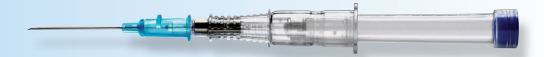

Cathéter intraveineux VanishPoint®



Seringue Patient Safe®